



Bellarti®

ТЫ СОЗДАНА СИЯТЬ

ver.1.2_11/2025





Bellarti® Fillers

Контурная пластика

new

Bellarti®
Universal

Bellarti®
Kiss


Bellarti®
**Soft
Touch**

Bellarti®
**Deep
Lines**




Экосистема Bellarti®	4
Bellarti® Hydrate	8
Bellarti® Lift	10
Bellarti® Plus	12
Bellarti® Extra Plus	12
Bellarti® Amino	14
Bellarti® Amino Plus	14
Bellarti® Vita	16
Bellarti® Vita Plus	16
Bellarti® Estilla	18
Bellarti® Nucleo 7,5	20
Bellarti® Nucleo 20	20
Трихология Bellarti® Nucleo 7,5	22
Bellarti® Oxy	23
Комбинированные протоколы	24

Инъекционная линейка препаратов Bellarti®

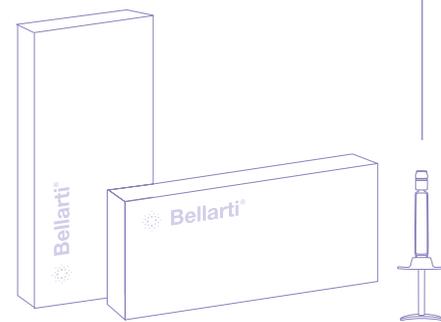

➤ каталог

✓
**Экосистема
 косметологических
 препаратов**

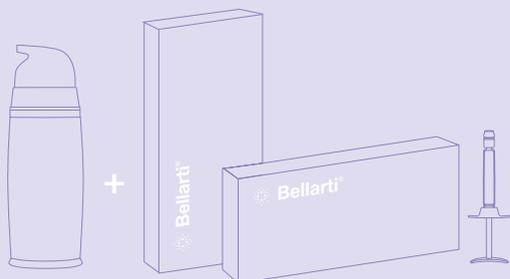

**Все препараты линейки
 сочетаются между собой**

- исключена вероятность нежелательных явлений, так как препараты не конкурируют между собой
- расширены показания к процедурам
- обеспечивается более яркий эффект за максимально короткий срок

Бренд Bellarti® предлагает широкий ассортимент препаратов, который закрывает абсолютно любую потребность как врача, так и пациента

- бренд разнонаправленных биоревитализантов, содержащий все востребованные компоненты
- фармацевтическое качество производимой продукции
- прозрачность производства и состава
- широкий спектр показаний к применению
- доступная сертифицированная процедура для пациента


Только премиальные субстанции

Производство на фармацевтическом заводе по стандартам GMP и ISO

Собственные R&D лаборатории

Современное оборудование и технологии производства


Удобная эргономика шприца позволяет врачу проводить процедуру с максимальным комфортом и точно дозировать препарат

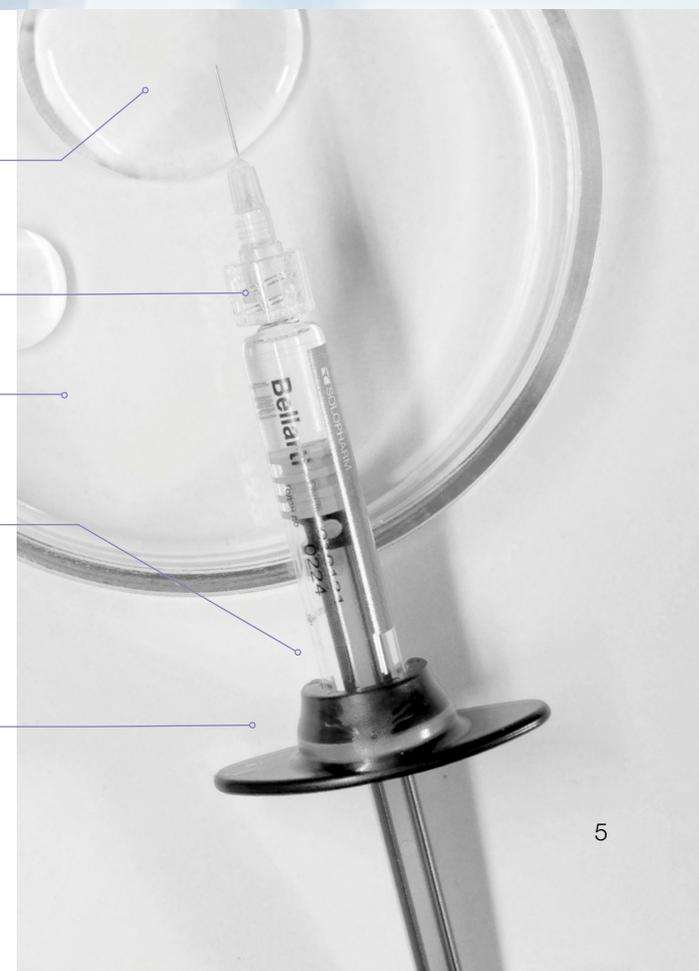



100% качество в каждом шприце

- Входной контроль: 22 физико-химических показателя + микробиология
- Контроль на каждой стадии производства
- Выходной контроль: карантин 40-45 дней, контроль перед отгрузкой
- Механическая устойчивость (к тряске во время транспортировки)
- Устойчивость к УФ излучению
- Стресс-испытания: препараты не расслаиваются, не теряют стерильности, не изменяют своих свойств

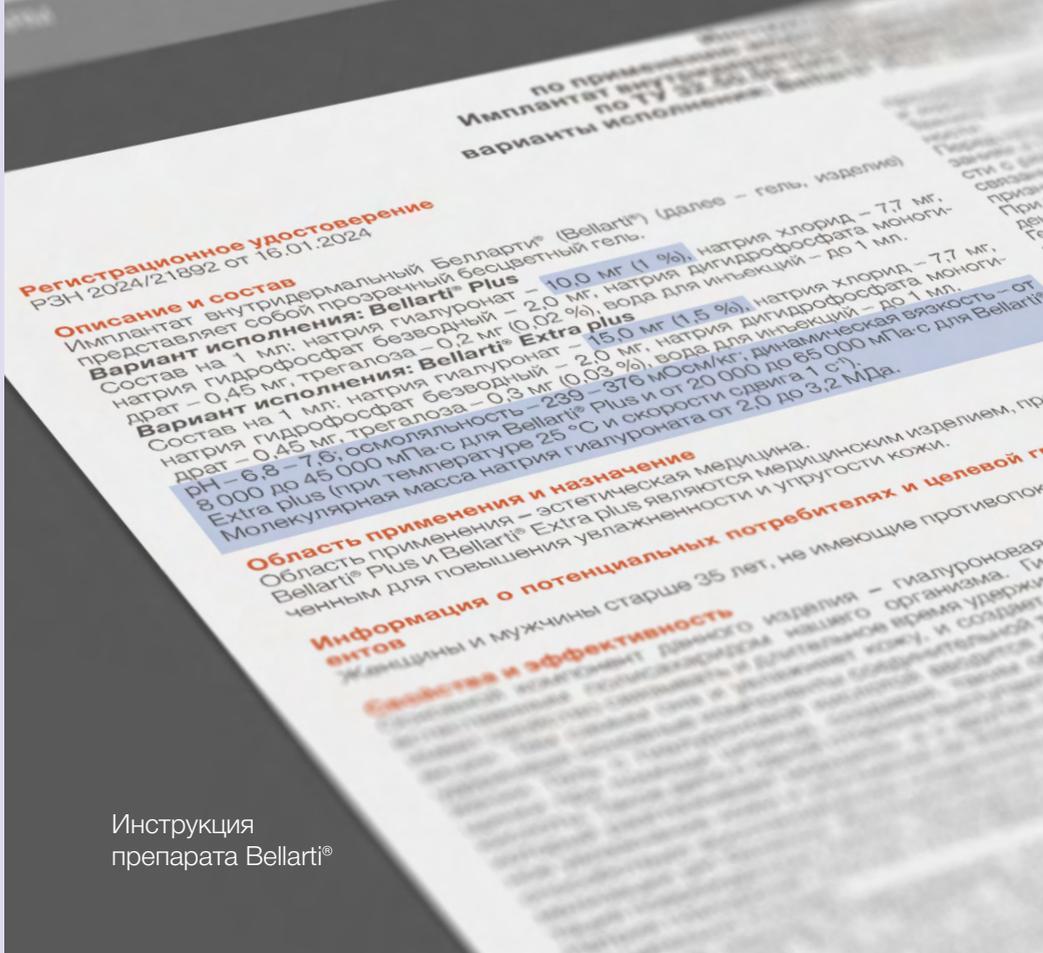

Инструкция препарата Bellarti®

Прозрачность сотрудничества

Bellarti® — надежный партнер.

Это отражается не только в партнерских отношениях, но и в прозрачности производства

> В инструкции указаны все показатели реологических свойств гиалуроновой кислоты

Это позволяет врачу-косметологу правильно подобрать препарат для каждого пациента




Разная концентрация гиалуроновой кислоты не является гарантией различной плотности препаратов и их действия.

За это отвечают показатели молекулярной массы и динамической вязкости.

Именно они дают возможность оценить, насколько ярким и длительным будет эффект от проводимой процедуры.

Bellarti® использует только высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, что позволяет безопасно сочетать несколько препаратов в рамках одной процедуры

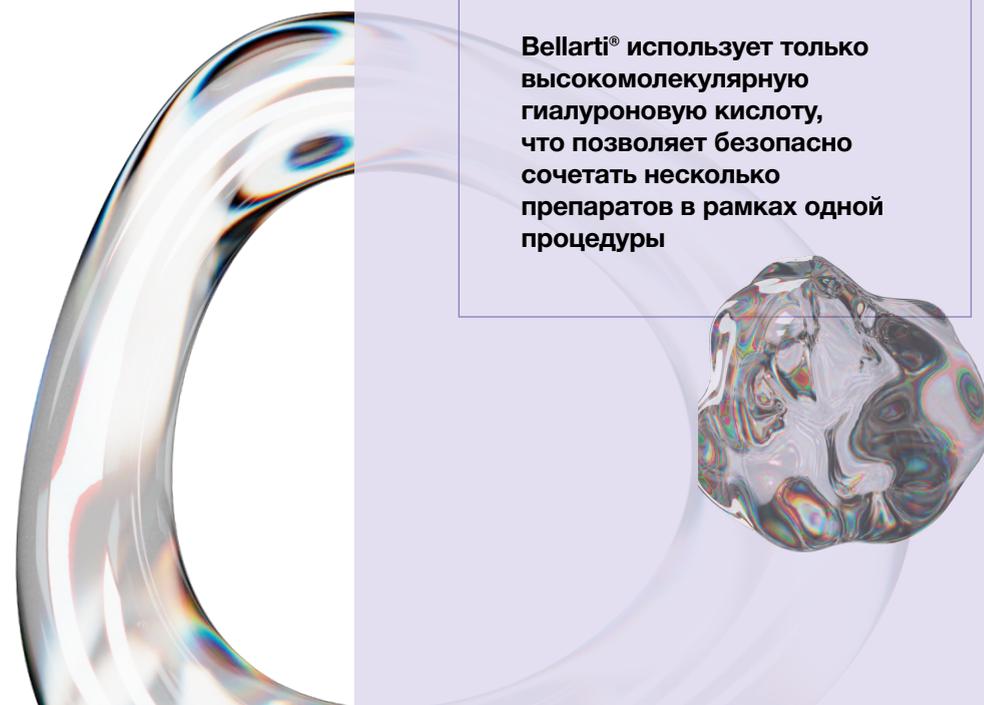

Bellarti® Hydrate



Классическая биоревитализация

Гиалуроновая кислота
13,5 мг/мл [1,35%]
нестабилизованная
высокомолекулярная
2,7-3,2 мДа

Маннитол
4,9 мг/мл [0,49%]

pH 6,8-7,6

Показания

- коррекция «морщин обезвоженности»
- профилактика преждевременного старения кожи
- восстановление упругости и тургора кожи
- увлажнение кожи

МАННИТОЛ

- > способствует медленной биоферментации гиалуроновой кислоты и постепенной и длительной стимуляции фибробластов
- > способствует стабильной выработке компонентов межклеточного вещества дермы
- > является осмотическим диуретиком, который оказывает дренажное действие и снимает воспаление после проведения косметологических процедур



1 Микропапульная*
> периорбитальная зона, лицо
> папула 1-2 мм
> глубина введения иглы — 1,5 мм
> до 0,2 мл на глаз

2 Папульная
> лицо, шея, декольте
> папула до 4 мм
> глубина введения иглы — 2-3 мм

3 Канюльная
> нижняя треть лица, шея, декольте, кисти рук
> линейно-ретроградно, веерно

Курс применения


- 1 Базовый**
 - 2-3 процедуры
 - интервал 15 дней
- 2 Поддерживающий**
 - 2-3 процедуры
 - интервал 1 месяц

3 Подготовка к другим вмешательствам
1 процедура в соответствии с протоколом

Глубина введения

Поверхностный слой дермы, область дермо-эпидермального соединения

> видео-инструкция по техникам введения

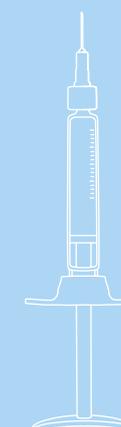

Bellarti® Lift



Пролонгированная биоревитализация

Гиалуроновая кислота
18 мг/мл [1,8%]
нестабилизованная
высокомолекулярная
2,7-3,0 мДа

Глицерол
4,9 мг/мл [0,49%]


pH 6,8-7,6

Показания

- выраженное повышение увлажненности кожи
- биоармирование кожи
- примерка филлера

ГЛИЦЕРОЛ

- > адсорбирует молекулы воды, тем самым препарат обладает хорошими гидратирующими свойствами
- > предотвращает реакцию перекисного окисления и защищает клетку от повреждения свободными радикалами
- > регулирует дифференцировку кератиноцитов и укрепляет эпидермальный барьер
- > адсорбируется кожей и обеспечивает увлажняющий, разглаживающий эффект

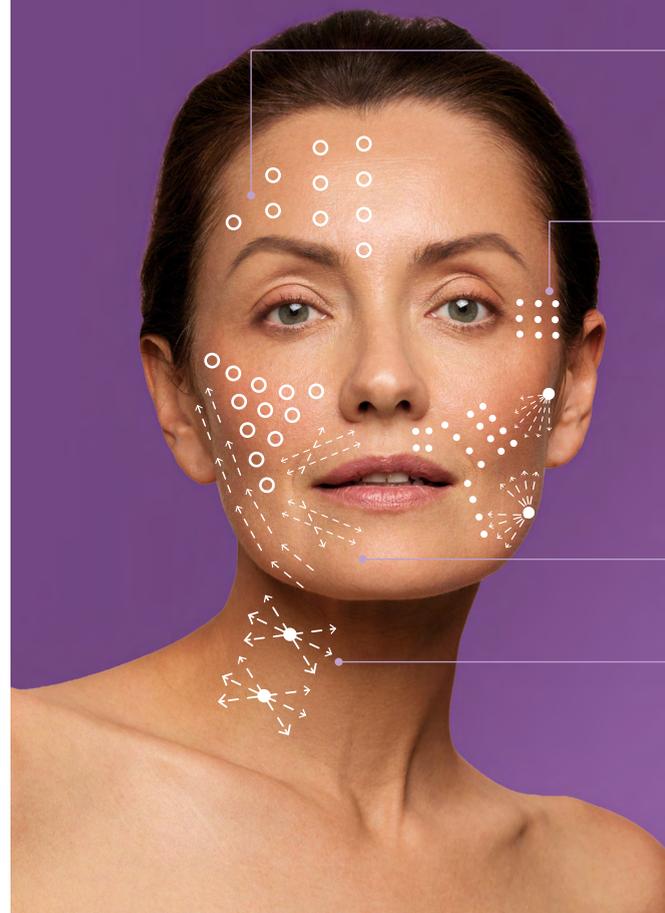

1 Папульная

- > лицо, шея, декольте
- > папула до 4 мм

2 Бугорковая*

- > зона лба, периорбитальные морщины типа «гусиные лапки», кисетные морщины
- > папула до 4 мм

3 Линейная

- > армирование средней и нижней трети лица, «кольцо Венеры», декольте

4 Канюльная

- > нижняя треть лица, губы, шея, декольте, кисти рук
- > линейно-ретроградно, веерно


Курс применения

- 1 Базовый**
 - 2-4 процедуры
 - интервал 1 месяц
- 2 Поддерживающий**
 - 1 процедура
 - интервал 3-4 месяца
- 3 Подготовка к другим вмешательствам**
 - 1 процедура в соответствии с протоколом


Глубина введения

Интрадермально.
Глубина введения
иглы 2-3 мм

- > видео-инструкция по техникам введения

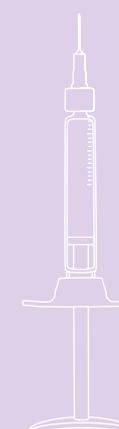

Bellarti® Plus Bellarti® Extra Plus

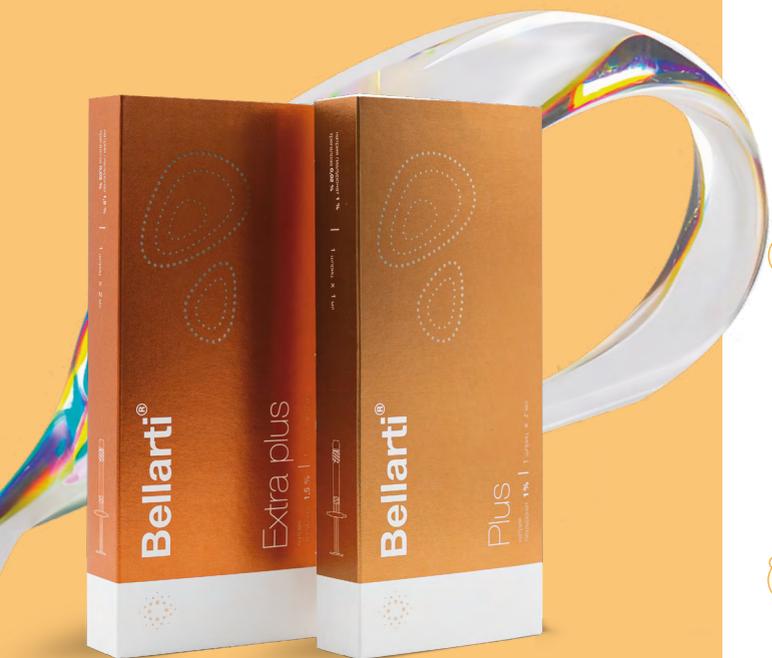

Усовершенствованная формула внутриклеточного очищения



Гиалуроновая кислота

нестабилизированная высокомолекулярная 2,0–3,2 мДа

Bellarti® Plus
10 мг/мл [1%]

Bellarti® Extra Plus
15 мг/мл [1,5%]



Трегалоза

Bellarti® Plus
0,2 мг/мл [0,02%]

Bellarti® Extra Plus
0,3 мг/мл [0,03%]


pH 6,8-7,6

Показания

- восполнение потерь гиалуроновой кислоты, связанных с возрастными изменениями кожи
- акне, постакне
- розацеа
- гиперпигментация

ТРЕГАЛОЗА

- > усиливает аутофагию
- > защищает клетки от влияния стрессовых воздействий окружающей среды
- > участвует в процессах ранозаживления
- > обеспечивает длительное увлажнение тканей

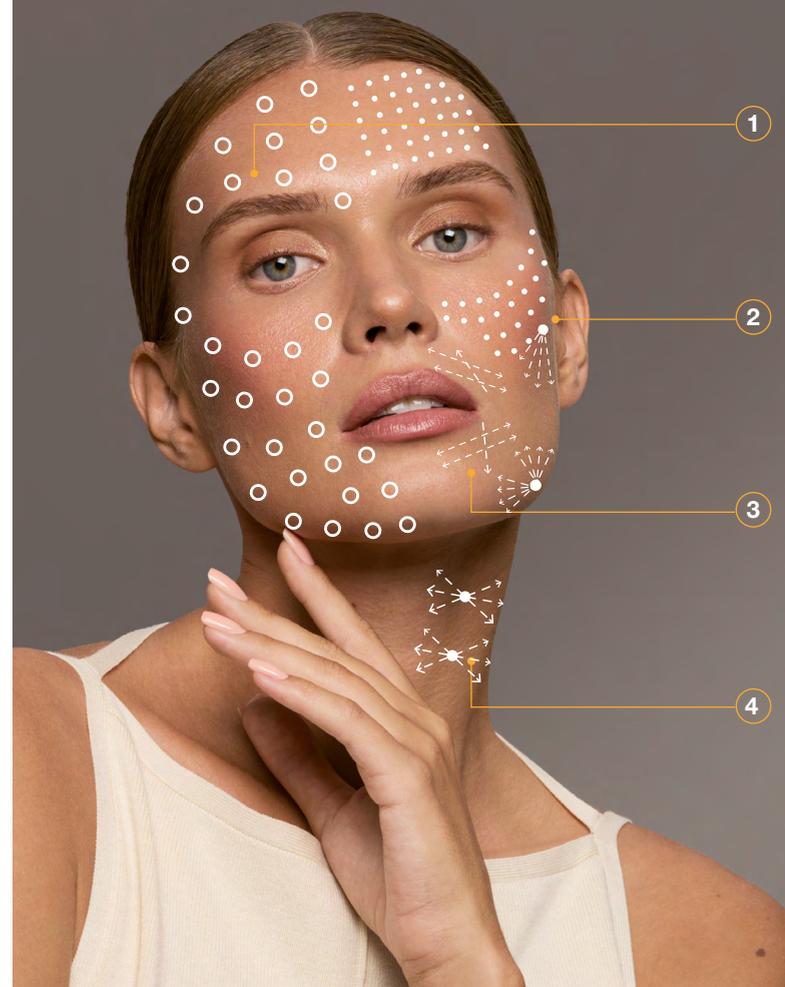

1 Папульная

Bellarti® Plus, Bellarti® Extra Plus

- > лицо, шея, декольте
- > папула до 4 мм

2 Микропапульная*

Bellarti® Plus

- > лицо, шея, декольте
- > папула 1-2 мм

3 Линейная

Bellarti® Plus, Bellarti® Extra Plus

- > армирование средней и нижней трети лица, «кольцо Венеры», декольте

4 Канюльная

Bellarti® Plus, Bellarti® Extra Plus

- > нижняя треть лица, шея, декольте, кисти рук
- > линейно-ретроградно, веерно

Курс применения

1

Базовый

- **Bellarti® Plus**
- 2-3 процедуры
- интервал 15 дней
- **Bellarti® Extra Plus**
- 2-3 процедуры
- интервал 21 дней

2

Поддерживающий


- **Bellarti® Plus**
- 2-3 процедуры
- интервал 1 месяц
- **Bellarti® Extra Plus**
- 2-3 процедуры
- интервал 3 месяца

3

Подготовка к другим вмешательствам

1 процедура в соответствии с протоколом

Глубина введения

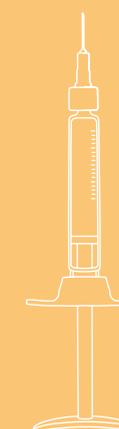

Поверхностный слой дермы, область дермо-эпидермального соединения. Глубина введения иглы 2-3 мм

> видео-инструкция по техникам введения



Bellarti® Amino Bellarti® Amino Plus



Источник упругости кожи



Гиалуроновая кислота
15 мг/мл [1,5%]
нестабилизированная
высокомолекулярная
2,0-3,2 мДа



Комплекс аминокислот
аргинин, валин, треонин,
фенилаланин, глицин,
глутаминовая кислота,
пролин, метионин

Bellarti® Amino
0,0124 мг/мл [0,00124%]

Bellarti® Amino Plus
0,0248 мг/мл [0,00248%]


pH 6,8-7,6

Показания

- усталое лицо
- пигментация
- фотопротекция — подготовка кожи к инсоляции
- улучшение цвета кожи

КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ

- > стимулирует фибробласты
- > стимулирует формирование нового коллагенового волокна
- > поддерживает барьерные функции кожи
- > способствует восстановлению пигментации кожи
- > стимулирует процессы регенерации

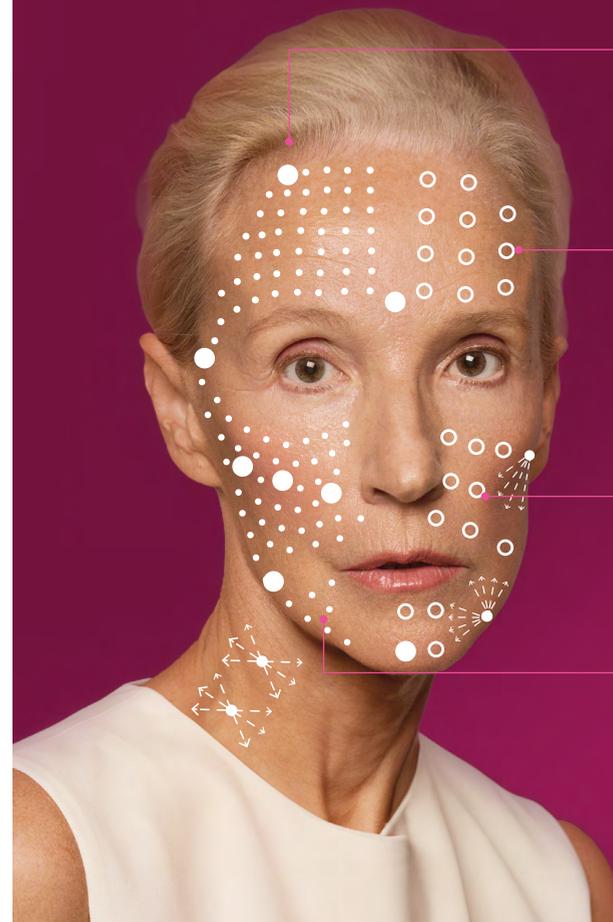

1 Микропапульная*

Bellarti® Amino
> лицо, шея, декольте
> папула 1-2 мм

2 Папульная

Bellarti® Amino, Bellarti® Amino Plus
> лицо, шея, декольте
> папула до 4 мм

3 Канюльная

Bellarti® Amino Plus
> нижняя треть лица, шея, декольте,
кисти рук
> линейно-ретроградно, веерно

4 Техника БАТ

Bellarti® Amino Plus
> 11-12 точек
> 0,1 мл на точку

Линейно по дермальным заламам

Курс применения

1

Базовый

- **Bellarti® Amino**
- 3-4 процедуры
- интервал 2 недели
- **Bellarti® Amino Plus**
- 2-3 процедуры
- интервал 2 недели

2

Поддерживающий

- **Bellarti® Amino**
- 2 процедуры
- интервал 1 месяц
- **Bellarti® Amino Plus**
- 2 процедуры
- интервал 2 месяца

3

Подготовка к другим вмешательствам

1 процедура в соответствии с протоколом

Глубина введения



Поверхностный слой дермы, область дермо-эпидермального соединения. Глубина введения иглы 2-3 мм

> видео-инструкция по техникам введения



Bellarti® Vita Bellarti® Vita Plus



ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА

- > замедляет клеточное старение
- > является мощным антиоксидантом
- > активирует лимфоотток, оказывает дренажное действие
- > нормализует клеточный энергообмен
- > повышает устойчивость тканей к воздействию повреждающих факторов

Молодость на клеточном уровне



Гиалуроновая кислота
нестабилизированная
высокомолекулярная
2,0–3,2 мДа

Bellarti® Vita
11 мг/мл [1,1%]

Bellarti® Vita Plus
18 мг/мл [1,8%]




Натрия сукцинат
16,9 мг/мл [1,69%]

pH 6,8-7,6



Показания

- стартовая процедура при наличии отечного компонента (Bellarti® Vita)
- сухая, дегидратированная кожа
- биоармирование
- «круги» под глазами
- коррекция фотостарения, фотоповреждения, дисхромий

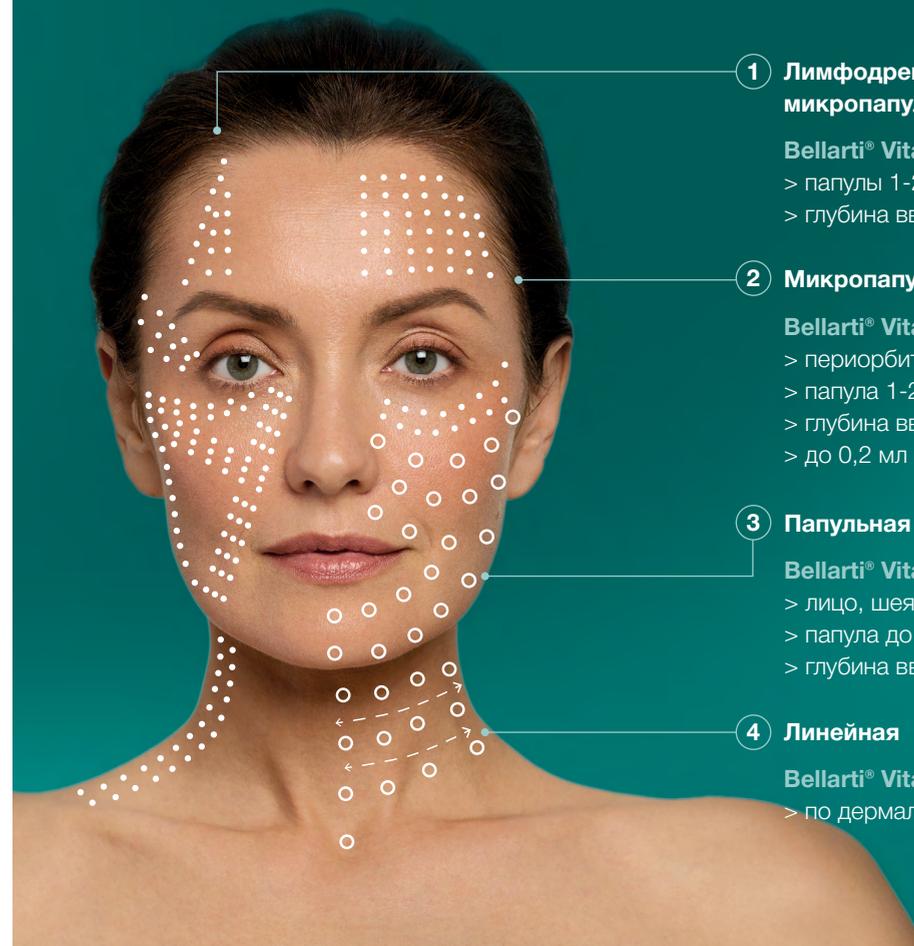

1 Лимфодренажная техника микропапульно

Bellarti® Vita

- > папулы 1-2 мм
- > глубина введения 1,5-2 мм

2 Микропапульная*

Bellarti® Vita

- > периорбитальная зона, лицо
- > папула 1-2 мм
- > глубина введения иглы — 1,5 мм
- > до 0,2 мл на глаз

3 Папульная

Bellarti® Vita, Bellarti® Vita Plus

- > лицо, шея, декольте
- > папула до 4 мм
- > глубина введения иглы — 2-3 мм

4 Линейная

Bellarti® Vita Plus

- > по дермальным заломам

Курс применения

1

Базовый

- 2-3 процедуры
- интервал 2 недели

2

Поддерживающий

- 1 процедура
- интервал 1 месяц

3

Подготовка к другим вмешательствам

- 1 процедура в соответствии с протоколом

Глубина введения



Поверхностный слой дермы, область дермо-эпидермального соединения

- > видео-инструкция по техникам введения





Первый зарегистрированный в России полирепарат на основе полимолочной кислоты

Гиалуроновая кислота
7,5 мг/мл [0,75%]
нестабилизированная
высокомолекулярная
2,0-3,2 мДа

Полимолочная кислота
10 мг/мл [1%]


Режим хранения
от + 2°C до + 8°C

Показания

- восстановление упругости и тургора кожи возрастных пациентов
- дряблость кожи, снижение ее эластичности
- опущение тканей лица
- глубокие морщины
- изменение контура лица и шеи
- истончение кожи и подкожно-жировой клетчатки

ПОЛИМОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

- > запускает синтез коллагена
- > стимулирует ключевые структурные компоненты кожи
- > восстанавливает плотность кожи
- > восстанавливает объемы при истонченной ПЖК

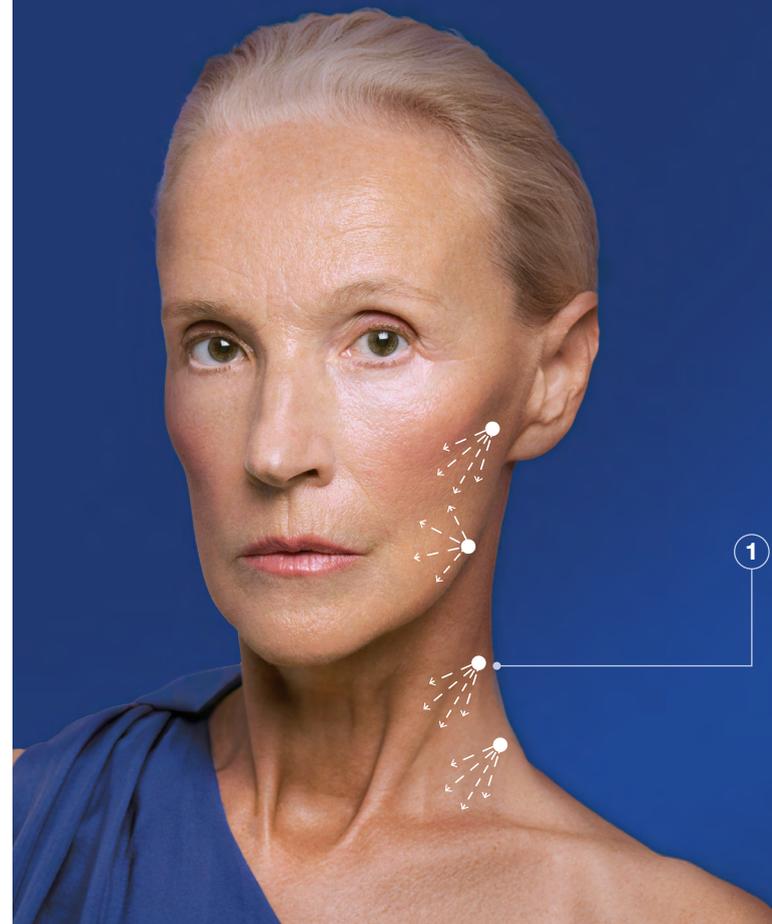

1 Канюльная

- > нижняя треть лица, шея, декольте, кисти рук
- > линейно-ретроградно, веерно

Курс применения

Базовый

- 1-2 процедуры
- интервал 2 месяца*

*количество процедур зависит от качества кожи пациента и определяется специалистом

Подготовка к процедуре

Достать шприц из холодильника за пару часов до проведения процедуры

Либо перед процедурой согреть шприц до комнатной температуры

Глубина введения

На границе с подкожно-жировой клетчаткой

- > видео-инструкция по техникам введения



Bellarti® Nucleo 7,5 Bellarti® Nucleo 20



ПОЛИНУКЛЕОТИДЫ

- > помогают ускорить процесс регенерации кожи, обладают противовоспалительным действием
- > обладают антиоксидантной защитой
- > активируют выработку коллагена и эластина за счет стимуляции фибробластов и кератиноцитов

Новое поколение биорепарантов



Bellarti® Nucleo 7.5
Полинуклеотиды 7,5 мг/мл

Bellarti® Nucleo 20
Полинуклеотиды 20 мг/мл

pH 6,8-7,6


Показания

Bellarti Nucleo 7.5

- Мимические морщины
- Темные круги под глазами
- Розацеа, купероз
- Рубцовые изменения

Bellarti Nucleo 20

- Коррекция возрастных изменений кожи
- Морщины, дермальные заломы
- Коррекция овала лица
- Стрии
- Рубцовые изменения

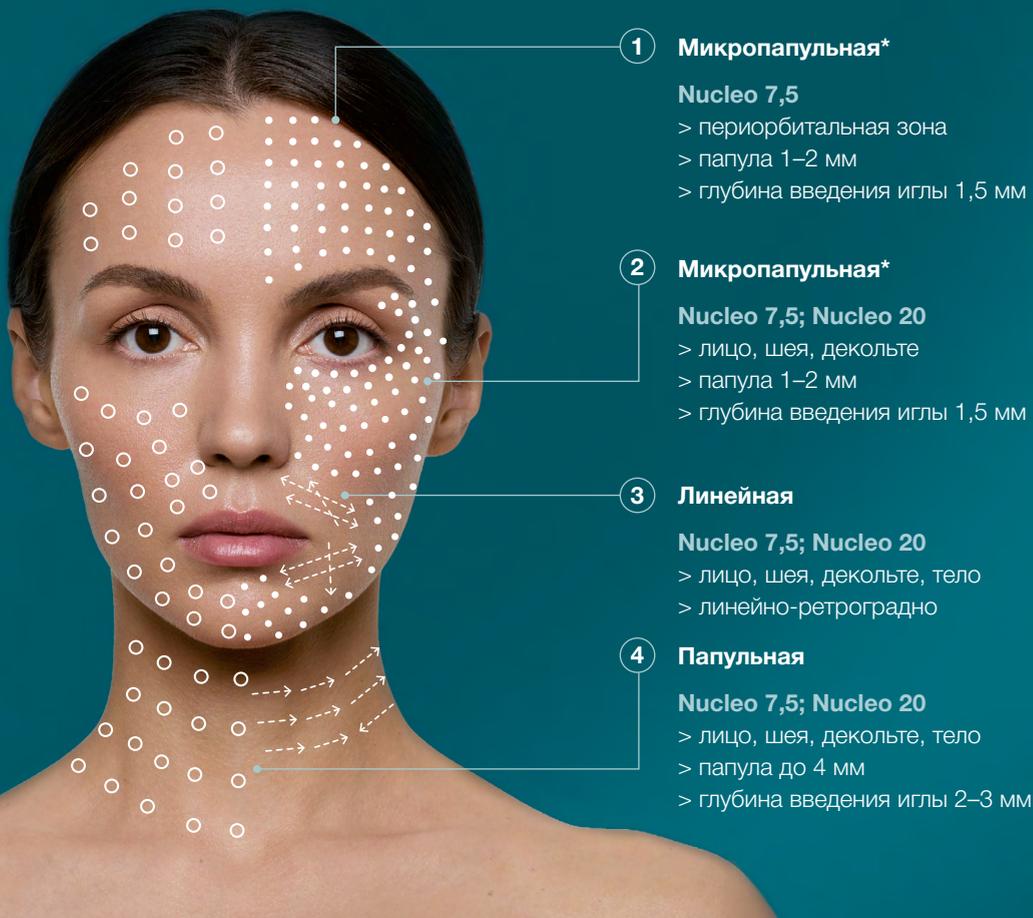

- 1 Микропапульная***
Nucleo 7,5
> периорбитальная зона
> папула 1–2 мм
> глубина введения иглы 1,5 мм
- 2 Микропапульная***
Nucleo 7,5; Nucleo 20
> лицо, шея, декольте
> папула 1–2 мм
> глубина введения иглы 1,5 мм
- 3 Линейная**
Nucleo 7,5; Nucleo 20
> лицо, шея, декольте, тело
> линейно-ретроградно
- 4 Папульная**
Nucleo 7,5; Nucleo 20
> лицо, шея, декольте, тело
> папула до 4 мм
> глубина введения иглы 2–3 мм

Курс применения

Базовый


- 1–2 процедуры
- интервал 2 недели*

*количество процедур зависит от качества кожи пациента и определяется специалистом


Глубина введения

Поверхностный слой дермы, область дермо-эпидермального соединения

> видео-инструкция по техникам введения

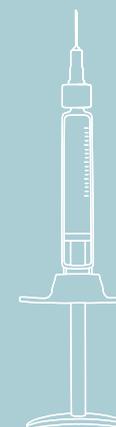

Трихология Bellarti® Nucleo 7,5

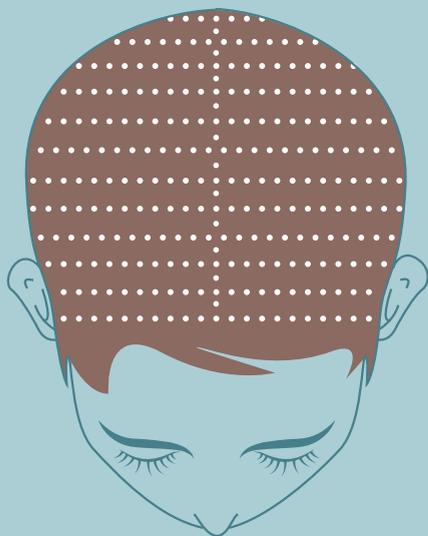

МИКРОПАПУЛЬНО

- > папула 1–2 мм
- > глубина введения иглы 1,5 мм



Телогеновое выпадение

- **Базовый курс:** 5 процедур, интервал 2 недели*
- **Поддерживающий:** 3 процедуры, интервал месяц*

Андрогенная алопеция

- **Базовый курс:** 10 процедур, интервал 2 недели*
- **Поддерживающий:** 3 процедуры, интервал месяц*

Постковидная алопеция

- **Базовый курс:** 4 процедуры, интервал 2 недели*
- **Поддерживающий:** 3 процедуры, интервал месяц*

Показания

- сокращение выпадения волос при андрогенной алопеции
- профилактика диффузного телогенового выпадения волос в комплексной терапии алопеции
- профилактика выпадения волос при постковидной алопеции
- улучшение микроциркуляции и насыщение крови кислородом
- нормализация жизненного цикла волосяного фолликула

Инновация восстановления кожи

○ **Перфтордекалин** 1,3 мг/мл,
декспантенол 5 мг/мл,
хлоргексидин 5,3 мг/мл

○ **Экономичный расход**
Более 300 нажатий

Показания

- уход за раздраженной, чувствительной и поврежденной кожей
- регенерация кожи
- восстановление кожи после абляционных процедур

Bellarti® Oxy



ТРОЙНАЯ ЗАБОТА О КОЖЕ

- > **перфтордекалин** запускает процессы ранозаживления, обеспечивает насыщение тканей кислородом, обладает ярковыраженными противовоспалительными свойствами
- > **декспантенол** стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон.
- > **хлоргексидин** — антисептическое действие

Увлажнение, сухость кожи

Мелкоморщинистый

Bellarti® Hydrate
> лоб, периорбита
> микропапульная техника
> 1 мл обе зоны*, не более 0,2 мл на глаз

Bellarti® Lift
> средняя и нижняя треть лица,
шея, декольте
> папульная техника 1-3 мл*

Деформационно-отечный мускульный

1 этап
Bellarti® Vita
> лимфодренажная техника
> микропапульно

2 этап
Bellarti® Hydrate
> лоб, периорбита
> микропапульная техника
> 1 мл обе зоны, не более
0,2 мл на глаз

Bellarti® Plus
> лицо, шея, декольте
> папульная
техника 2 мл*

Усталый

Bellarti® Nucleo
> лоб, периорбита
> микропапульная техника

Bellarti® Amino Plus
> протокол 11 или 12 БАТ
> 0,1 мл в каждую точку
(1,8 – 2 мл на все лицо)

Акне, постакне

Мелкоморщинистый

Bellarti® Lift
> локально
> микропапульная техника

Bellarti® Extra Plus
> лицо, шея, декольте
> папульная техника 2 мл*
Избегать периорбитальную область!

и / или

Bellarti® Amino
> лицо, шея, декольте
> папульная техника 2 мл*

Деформационно-отечный

1 этап
Bellarti® Nucleo
> лоб, периорбита
> микропапульная техника

Bellarti® Extra Plus
> лицо, шея, декольте
> болюсно

2 этап
Bellarti® Vita
> лимфодренажная техника
> микропапульно

Bellarti® Lift
> локально
> под рубец
> микропапульная техника

Усталый / мускульный

1 этап
Bellarti® Nucleo
> лоб, периорбита
> микропапульная техника

2 этап
Bellarti® Lift
> локально
> под рубец
> микропапульная техника

Bellarti® Hydrate
> лоб, периорбита
> микропапульная техника
> 1 мл обе зоны, не более
0,2 мл на глаз

Bellarti® Amino Plus
> протокол 11 или 12 БАТ
> 0,1 мл в каждую точку
(1,8 – 2 мл на все лицо)

Пигментация, розацеа

Мелкоморщинистый / мускульный

1 этап
Bellarti® Vita
> лимфодренажная техника
> микропапульно

Bellarti® Plus
> лицо, шея, декольте
> папульная техника 2 мл*

2 этап
Bellarti® Hydrate
> лоб, периорбита
> микропапульная техника
> 1 мл обе зоны*, не более
0,2 мл на глаз

Bellarti® Extra Plus
> лицо, шея, декольте
> папульная техника 1-3 мл*
Избегать периорбитальную
область!

Деформационно-отечный

Bellarti® Vita
> лицо, шея, декольте
> папульная техника 2 мл*

Bellarti® Extra Plus
> лицо, шея, декольте
> папульная техника 2 мл* / локально
Избегать периорбитальную область!

Усталый

Bellarti® Amino
> лоб, периорбита
> микропапульная техника 2 мл*

Bellarti® Extra Plus
> шея, декольте
> папульная техника 2 мл*
Избегать периорбитальную область!

Локальная пигментация

Мелкоморщинистый деформационно- отечный мускульный усталый

Bellarti® Extra Plus
> локально
> микропапульная техника

Bellarti® Amino
> шея, декольте
> папульная техника 2 мл*

Подготовка к аппаратным процедурам

Мелкоморщинистый



Bellarti® Extra Plus

- > лицо, шея, декольте
- > папульная техника 2 мл*

Избегать периорбитальную область!



Bellarti® Amino

- > протокол 11 или 12 БАТ
- > 0,1 мл в каждую точку
- (1,8 – 2 мл на все лицо)

Деформационно-отечный



Bellarti® Hydrate

- > лоб, периорбита
- > микропапульная техника
- > 1 мл обе зоны*, не более 0,2 мл на глаз



Bellarti® Plus

- > протокол 11 или 12 БАТ
- > 0,1 мл в каждую точку
- (1,8 – 2 мл на все лицо)

Усталый



Bellarti® Hydrate

- > лоб, периорбита
- > микропапульная техника
- > 1 мл обе зоны*, не более 0,2 мл на глаз



Bellarti® Plus

- > протокол 11 или 12 БАТ
- > 0,1 мл в каждую точку
- (1,8 – 2 мл на все лицо)

Мускульный



Bellarti® Hydrate

- > лоб, периорбита
- > микропапульная техника
- > 1 мл обе зоны*, не более 0,2 мл на глаз



Bellarti® Extra Plus

- > протокол 11 или 12 БАТ
- > 0,1 мл в каждую точку
- (1,8 – 2 мл на все лицо)

Восстановление после аппаратных процедур

Мелкоморщинистый / деформационно-отечный / мускульный / усталый



Bellarti® Amino Plus

- > протокол 11 или 12 БАТ
- > 0,1 мл в каждую точку
- (1,8 – 2 мл на все лицо)



Bellarti® Vita

- > лимфодренажная техника
- > микропапульно

Подготовка к инсоляции

Мелкоморщинистый / усталый



Bellarti® Amino Plus

- > лицо, шея, декольте
- > папульная техника 2 мл*



Bellarti® Extra Plus

- > протокол 11 или 12 БАТ
- > 0,1 мл в каждую точку
- (1,8 – 2 мл на все лицо)

Деформационно-отечный / мускульный



Bellarti® Hydrate

- > лоб, периорбита
- > микропапульная техника
- > 1 мл обе зоны*, не более 0,2 мл на глаз



Bellarti® Extra Plus

- > протокол 11 или 12 БАТ
- > 0,1 мл в каждую точку
- (1,8 – 2 мл на все лицо)

Восстановление после инсоляции

Мелкоморщинистый морфотип / деформационно-отечный / мускульный / усталый



Bellarti® Extra Plus

- > лицо, шея, декольте
- > папульная техника 2 мл*
- Избегать периорбитальную область!



Bellarti® Amino Plus

- > протокол 11 или 12 БАТ
- > 0,1 мл в каждую точку
- (1,8 – 2 мл на все лицо)

Закрывающая процедура

Мелкоморщинистый / деформационно-отечный / мускульный / усталый



Bellarti® Oxy

- > местно
- Нанести пену на поврежденную кожу, оставить до полного впитывания. Остатки убрать салфеткой, нанести SPF

* в зависимости от состояния кожи





Увлажнение, сухость кожи

Bellarti® Hydrate
 > лоб, периорбита
 > микропапульная техника
 > 1 мл обе зоны*, не более 0,2 мл на глаз

Bellarti® Estilla
 > средняя, нижняя треть лица
 > канюльная техника
 > веерно, линейно-ретроградно

Аппаратные процедуры

Bellarti® Estilla
 > средняя, нижняя треть лица
 > канюльная техника
 > веерно, линейно-ретроградно

**PLLA через 6 месяцев,
RF через 1 месяц PLLA**

Усталый вид

Bellarti® Amino
 > лоб, периорбита
 > микропапульная техника 2 мл

Bellarti® Estilla
 > средняя, нижняя треть лица
 > канюльная техника
 > веерно, линейно-ретроградно

Закрывающая процедура

Мелкоморщинистый деформационно-отечный мускульный усталый

Bellarti® Oxy
 > местно
 Нанести пену на поврежденную кожу, оставить до полного впитывания. Остатки убрать салфеткой, нанести SPF

Bellarti® Estilla



Полирепарат пролонгированного действия с мощным коллагено-стимулирующим эффектом для пациентов с выраженными возрастными изменениями и несовершенствами кожи

Нити

Bellarti® Estilla
 > средняя, нижняя треть лица
 > канюльная техника
 > веерно, линейно-ретроградно

**PDO через 3 месяца
PLLA интервал 7-8 месяцев
С коллагеном интервал 1,5 месяца**

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ КОЖИ

Для заметок



A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning across the page.

ООО «ГРОТЕКС»,
тел.: +7 812 385 47 87

> Санкт-Петербург

Завод: Индустриальный пр., д. 71/2, лит. А
Офис: Львовская ул., д. 27, БЦ «Office L27»

> Москва

Офис: ул. Бутырский Вал, д. 10,
БЦ «Белая площадь»

bellarti.ru



solopharm.com

