

## Инструкция по применению медицинского изделия

### Средство для промывания и орошения полости носа для детей и взрослых «ЛинАква», изотоническая концентрация по ТУ 9398-001-64260974-2015

#### Регистрационное удостоверение

РЗН 2015/3306 от 13.05.2022

#### Наименование варианта исполнения медицинского изделия

ЛинАква норм аэрозоль 50 мл, 100 мл, 125 мл, 150 мл, 200 мл

#### Описание и состав медицинского изделия

Средство для промывания и орошения полости носа для детей и взрослых ЛинАква норм (далее – Средство), прозрачная бесцветная жидкость без запаха со слабосоленым вкусом.

Изотоническая натуральная стерильная морская вода с содержанием натрия хлорида (NaCl) 9 г/л, с показателем осмосальности 200 – 400 мОсм/кг.

Содержит все активные вещества и микроэлементы морской воды:

K и Si – способствуют регенерации поврежденных клеток слизистой оболочки носа.

Ca, Mg и S – принимают участие в регуляции частоты сокращений ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, благодаря чему со слизистой оболочки носа удаляются вредоносные микроорганизмы и продукты их распада. Ca дополнительно обладает противоаллергическим действием.

Zn и Se – способствуют повышению местной иммунной ответа, обеспечивают защиту клеток слизистой оболочки дыхательных путей от апоптоза.

Cl – принимает участие в регулировании pH и объема клеток, ответственен за трансэпителиальный перенос солей и воды и стабилизацию мембранного потенциала; в соединении с Na снижает выработку и высвобождение ИЛ-8 респираторным эпителием, обеспечивая противовоспалительный эффект Средства.

I – способствует нормализации выработки назальной слизи и обеспечивает Средству антисептический эффект.

Fe – транспортирует кислород к тканям; входит в состав гемоглобина и отвечает за дыхательные процессы на клеточном уровне.

Средство не содержит консервантов.

#### Область применения медицинского изделия

Область применения – оториноларингология. Средство предназначено для профилактики и использования в комплексном лечении ЛОР-заболеваний для детей с 2-х лет и взрослых, посредством промывания и орошения слизистой полости носа и носоглотки.

#### Свойства медицинского изделия

Благодаря входящим в состав микроэлементам Средство:

- оказывает противовоспалительное и увлажняющее действие, снимает раздражение;
- тщательно промывает все отделы полости носа и носоглотки, активно очищая их от бактерий, вирусов, аллергенов, корок, слизи, частиц пыли;
- поддерживает нормальное физиологическое состояние слизистой оболочки полости носа, повышает местный иммунитет;
- уменьшает отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, способствует восстановлению носового дыхания;
- повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости носа и сокращает продолжительность респираторных заболеваний;
- снижает риск распространения инфекции в околоносовые пазухи и полость уха;
- ускоряет процессы регенерации слизистой оболочки полости носа и носоглотки, снижает риск развития осложнений после операций в полости носа и околоносовых пазухах.

#### Показания для применения медицинского изделия

Средство для промывания и орошения полости носа для детей и взрослых ЛинАква норм аэрозоль может применяться у детей с 2-х лет и взрослых. Распыление – струя.

- для ежедневного использования в период эпидемии ОРВИ и гриппа;
- для ежедневного использования в качестве комплексного лечения острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа:
  - острые и хронические риниты;
  - острые и хронические синуситы;
  - острые и хронические аденоидиты;
  - аллергические и атрофические риниты;
- для подготовки слизистой носа к применению лекарственных средств;
- для дооперационного очищения.

#### Противопоказания для применения медицинского изделия

- индивидуальная непереносимость компонентов Средства для промывания и орошения;
- полная непроходимость носовых ходов;
- острый отит и обострение хронического отита.

#### Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и Средство перед применением. Не используйте Средство, если упаковка медицинского

изделия повреждена.  
Избегайте попадания Средства в глаза.

### **Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия**

Побочные действия при применении Средства в соответствии с инструкцией по применению не выявлены.

### **Взаимодействие с другими медицинскими изделиями**

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

### **Указания по применению**

При комплексном лечении и профилактике: промывание полости носа 4 раза в день.  
Длительность и кратность применения препарата не ограничены.

### **Методика промывания и орошения**

Наклонить голову набок.

Снять защитный колпачок с насадки-распылителя и ввести наконечник насадки-распылителя баллона в носовой проход, находящийся сверху.

В течение нескольких секунд промыть носовую полость. Висморкаться. При необходимости повторить процедуру. Провести процедуру с другим носовым проходом.



По окончании процедуры протереть наконечник распылителя салфеткой и надеть защитный колпачок.

### **Особые указания**

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

### **Взаимодействие с лекарственными средствами**

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством ЛинАква норм.

### **Форма выпуска**

Аэрозольный баллон с насадкой для носа и колпачком объемом 50 мл, 100 мл, 125 мл, 150 мл или 200 мл вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре от + 10 °С до + 30 °С, в недоступном для детей месте.

Беречь от прямых солнечных лучей и источника открытого огня.

Не подвергать изделие тепловой обработке.

### **Срок годности**

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

### **Производитель/Организация, принимающая претензии/Владелец регистрационного удостоверения**

ООО «Гротекс», Россия  
195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 71, корп. 2, лит. А  
Тел.: +7 812 385 47 87  
Факс: +7 812 385 47 88  
www.solopharm.com  
www.linaqua.ru

### **Основные технические и функциональные характеристики медицинского изделия**

Средство для промывания и орошения полости носа для детей и взрослых ЛинАква норм аэрозоль 50 мл, 100 мл, 125 мл, 150 мл, 200 мл выпускается по ТУ 9398-001-64260974-2015 с соблюдением международных и национальных стандартов.

Средство выпускается в металлических баллонах под давлением с внутренним антисептическим покрытием объемом 50 мл, 100 мл, 125 мл, 150 мл, 200 мл в комплекте с одной насадкой (струя) с защитным полипропиленовым колпачком.

По биологическому воздействию на пациента используемые материалы удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 52770 и стандартов серии ГОСТ ISO 10993. Средство биологически безопасно.

Средство стерильно и сохраняет стерильность в течение всего периода использования. Стерилизация осуществляется с применением методов асептического производства по ГОСТ ИСО 13408-2 (стерилизующая фильтрация).

### **Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия**

Средство предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным Средством в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

### **Гарантийные обязательства**

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований.

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности, при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

### **Условия транспортировки**

Всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от + 10 °С до + 30 °С. Беречь от нагрева.

### **Порядок осуществления утилизации и уничтожения**

Утилизировать Средство в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым коммунальным отходам).